

¡Para una medición fácil y segura de la Gravedad Específica de la Orina!

Refractómetro digital de "bolsillo"
Para la Gravedad Específica de la Orina

PAL-10S

Cat.No. 4410



El PAL-10S mide la Gravedad Específica de la Orina utilizando el método de Índice de Refracción. La gravedad Especifica de la Orina varía de acuerdo a su concentración.



TAMAÑO REAL

Características

- Calibración con agua solamente
- El tiempo de medición es tan sólo 3 segundos
- Resistente al agua y al polvo (IP65)
- Es ligero, compacto y pesa sólo 100g
- Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente
- Conveniente estuche de protección
- Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- Esta equipado con la función ELI (Interferencia a la Luz Externa)

Especificaciones

Rango de medición	: Gravedad Específica de la Orina 1.000 a 1.060 Temperatura 10.0 a 35.0°C
Resolución	: Gravedad Específica de la Orina 0.001 Temperatura 0.1°C
Exactitud	: Gravedad Específica de la Orina ±0.001 Temperatura ±1°C
Temperatura de la muestra	: 10 a 35°C (ATC)
Volumen de la medición	: 0.3ml o más
Tiempo de medición	: 3 segundos
Fuente de energía	: 2 × Baterías tipo AAA
Vida útil de la batería	: Aproximadamente 11,000 medidas (Cuando se utilizan baterías alcalinas)
Clase de Protección Internacional	: IP65 Resistente al agua
Dimensión y peso	: 55(W) × 31(D) × 109(H)mm, 100g (sólo unidad principal)

Método de medición



1. Ponga la muestra en el área de muestreo.



2. Presione el botón START.



3. El valor de la medición será mostrado en sólo 3 segundos.



Fácil y rápido de limpiar!

Todos los refractómetros ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

HACCP GMP GLP Todos los productos ATAGO cumplen con los estándares HACCP, GMP y GLP

ATAGO CO., LTD.

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor
2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943 FAX : 81-3-3431-1945
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

TEL : 1-425-637-2107 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

TEL : 91-22-2833-8038 / 8076 customerservice@atago-india.com

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

TEL : 662-982-8718-9 customerservice@atago-thailand.com

ATAGO BRASIL Ltda.

TEL : 55 16 3916-6000 customerservice@atago-brasil.com

ATAGO ITALIA s.r.l.

TEL : 39 2 36557267 customerservice@atago-italia.com

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

TEL : 86 20-38106065 info@atago-china.com



* La apariencia y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso